

分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。

3、护理增援：

分机液晶屏上有“请求增援”选项，对应按下方按键，主机上相应的路选分机键呈黄色闪亮，按键上显示“请求增援”，并语音播报“XX号房 XX号床 请求增援”，同时该病房门外的门灯亮，以提示需要增援；并在主机上显示“请求增援”；如需对讲，可点击主机上的相应路选分机键与之对讲。


4、查看信息：

分机液晶屏上有“治疗信息、费用信息、设备信息”三个查看信息选项，按下对应的查看信息键，可进入查看界面进行查看。

病床分机

产品安装使用说明



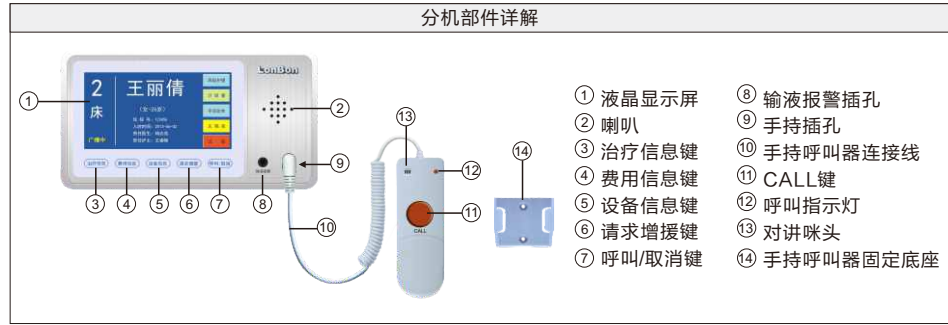


一、背面接口说明：

1、总线接口：


- 分机与模拟门口机 (NBN-BM) 的连接时：**将分机背后的总线接口 (1、2、3) 对应并联到模拟病房门口机的接口 (1、2、3) 总线上；如不用门口机，也可接在主机总线接口 (1、2、3) 上。
- 分机与模数病房门口机的连接时：**将分机背后的总线接口 (1、2、3) 对应并联到模数病房门口机 (1、2、3) 总线上。

2、外部设备接口：

- 门灯接口：**将分机的红 (门灯电源)、白 (门灯控制)、黑三芯引线对应与门灯上的黄、红、黑三芯引线相连。
- 灯光控制接口：**需另配灯光控制盒，有两组开关量输出，可分别接床头灯、照明灯，共2盏灯的开关控制。
具体接法：将床头灯 (或照明灯) 的两条线分别与开关量输出1、220V市电的任意一条线连接；220V市电的另一条线与开关量输出1的另一接口连接。(分机需配多功能手持才能实现此功能)
- 伴音输入接口：**暂无。
- 遥控输出接口：**暂无。
- 外接输出接口：**需另配按钮接线盒，分机可实现扩接5个防水按钮。将分机的红、棕、黑三芯引线对应与按钮接线盒上的电源、信号、地接线柱相连。

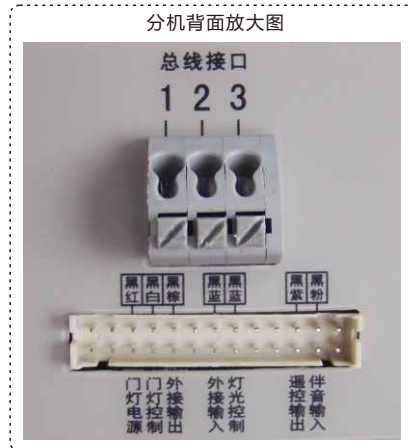

二、安装底盒预装墙面示意图：

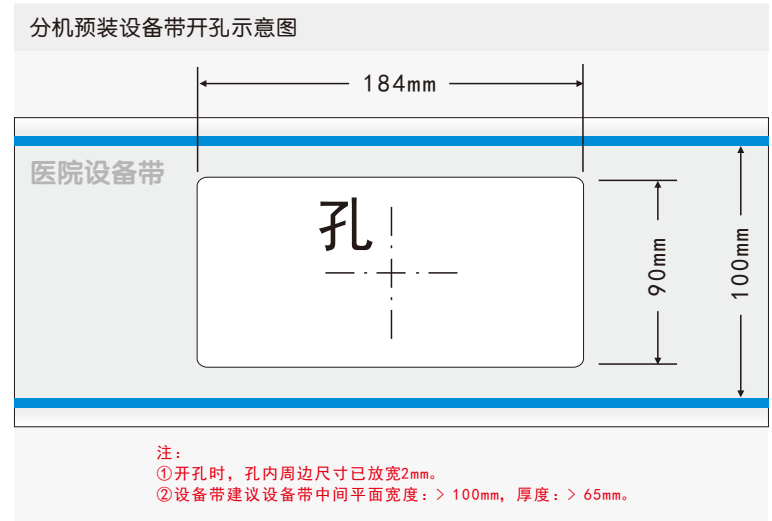

三、基本设置：

例：将分机编码成5号分机

将一台分机或多台分机与模数主机 (或病房门口机) 相连后，通电后进入开机自检状态。待自检完毕，点击主机 (或病房门口机) 上的“系统设置”菜单，选择“在线分机编码设置”项，准备给分机编码。请按住分机的“呼叫/取消”键5秒后再松开；此时主机 (或病房门口机) 会收到分机编码请求 (左下角出现红色闪烁)，然后选择5号路选分机键按下，当主机提示“已对码”，红色闪烁消失，即编码成功。

按上述方法将所有分机依次编码。当编完分机号码后，按分机的“呼叫/取消”键 (或CALL键) 呼叫主机，以确认分机的编号。

四、使用说明：

1、分机呼叫及对讲：

按下分机面板上的“呼叫/取消”键或手持呼叫器上的“CALL”键，主机触摸屏上相应的路选分机键呈红色闪亮并显示“呼入中...”，同时伴有语音播报及音乐提示声，同时该病房外的门灯亮；点击机上的相应路选分机键，路选键转变为绿色并显示“通话中...”，拿起话筒可与分机手柄双工通话；或按下主机免提TALK键，可与分机双向通话。

2、解除呼叫：