


# 求救按钮

— 安装调试使用说明 —




## 一、安装调试

安装在长者床头的墙壁上；支持一键报警求救及定位。也可安装在走廊、凉亭等公共区域，离地面1.2米墙壁上。正常绑定后，求救按钮报警或监护手表在此区域报警，监护主机均能收到报警及位置信息。求救按钮内置的定位信标覆盖半径5-7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年，仅在室内环境中工作。

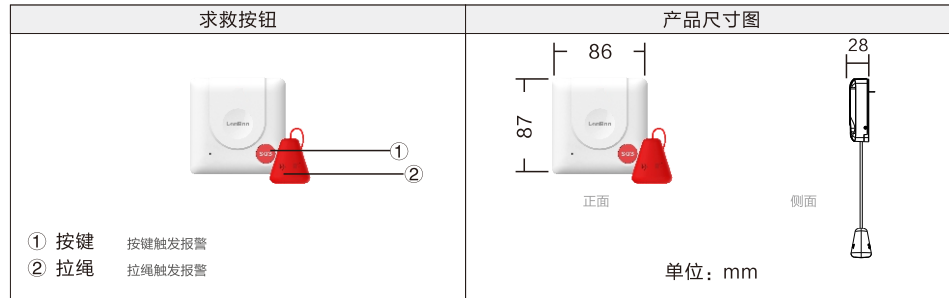

### 1、产品安装图

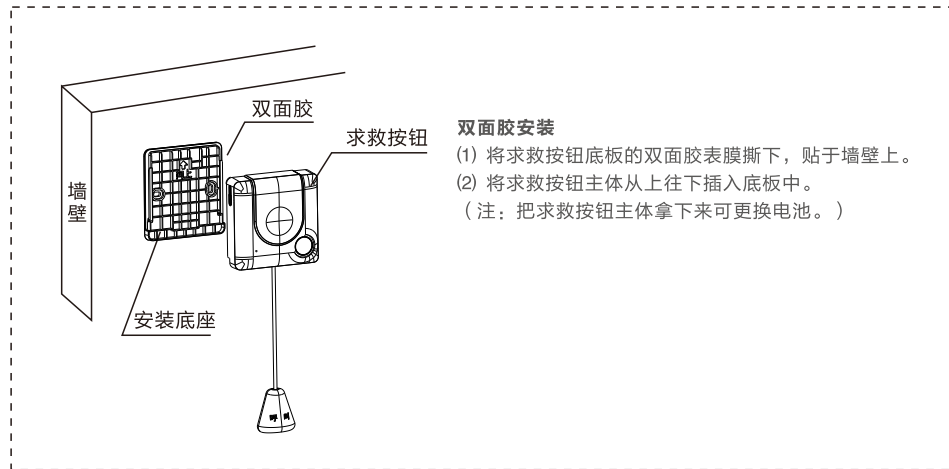

## 二、使用说明

### 1、设备使用

将求救按钮主体插在底板上，按一下按键听到“滴、滴..”响声，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救；听到“滴、滴..”慢响表示正在报警中，“滴滴、滴滴”表示报警成功，“滴滴滴、滴滴滴”表示报警失败，按钮报警失败将会再次自动报警，无需手动干预。

### 2、设备绑定

#### (1) 公共区域设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“机构/社区养老”App，进入“设备绑定-公共区域按钮绑定”栏，添加新的公共区域求救按钮，输入安装位置和所属主机号，选择扫码绑定，将手机对准求救按钮背面的二维码，根据提示完成绑定。(详情查看机构/社区养老App)

#### (2) 房间设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“机构/社区养老”App，进入“设备绑定-房间设备绑定”栏，选择需要安装的房间，在对应的位置的求救按钮栏（如：床头 求救按钮），点击“去绑定”，进入绑定界面，选择扫码绑定，将手机对准求救按钮背面的二维码，根据提示完成绑定。(详情查看机构/社区养老App)

## 三、技术参数

产品名称:	求救按钮	电池类型:	2节5号锂电池
续航时间:	>6年	存储容量:	RAM-128KB、ROM-512KB
工作温度:	-20℃~+60℃	工作湿度:	10%~99%
通信方式:	4G、蓝牙	通信网络:	中国移动
产品材质:	ABS+PC		