


体征监护仪（WiFi版）

— 安装调试使用说明 —



一、安装调试

体征监护仪安装在床头实时监测长者生命体征。产品通过专业传感器多维度采集长者的体征数据,包括心率、呼吸、离床等数据,实时上报至后台,并通过算法实时分析,出现异常能立即自动报警,提醒护理人员及时处

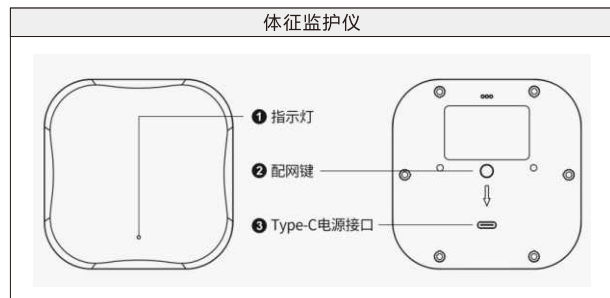


1、产品安装图

- 设备支持两种安装固定方式: 螺丝/3M胶, 且设备角度可根据实际场景进行调整。
- 设备安装高度建议为距床面1-1.5米之间。


• 将设备插入支架内




• 调整设备角度

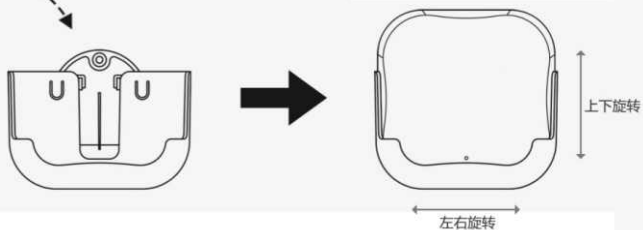

1

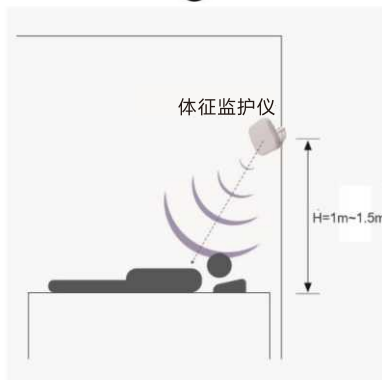

2

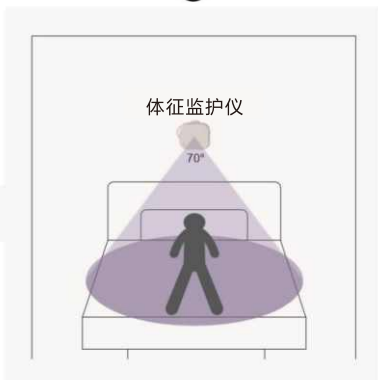

二、使用说明

1、注意事项

- 一张床只能安装一个体征监护, 且只能监测一人。
- 本产品并不是医疗设备或者防猝死设备, 使用者不应该完全依赖而忽略对长者的照顾。
- 此产品不适用于体内有金属支架或戴心脏起搏器的人群!
- 使用此产品时, 应保证按照安装要求进行安装, 否则会导致监测不准确。
- 此产品仅支持2.4G的WIFI网络, 不支持5G频段。

2、设备绑定

- 体征监护仪正常工作后, 打开“机构养老”/“社区养老”App, 进入“长者房间设备绑定”界面, 选择需要绑定房间进入绑定设备(若无房间, 请先在对应的管理平台上添加好房间);
- 下拉到床位设备, 点击“请选择设备绑定”, 在体征监护仪里点击“去绑定”, 将手机尽量靠近体征监护仪, 按照App上的提示进行按步骤即可完成绑定。

三、技术参数

通讯方式:	WiFi (2.4G)	供电方式:	适配器供电
供电接口:	Type-C	工作电压:	5V
工作温度:	-20℃~+50℃	工作湿度:	≤80% (无凝结)
尺寸:	90*90*17mm	重量:	100g