


# 体征监护仪（WiFi版）

— 安装调试使用说明 —





## 一、安装调试

体征监护仪安装在床头实时监测长者生命体征。产品通过专业传感器多维度采集长者的体征数据,包括心率、呼吸、离床等数据,实时上报至后台,并通过算法实时分析,出现异常能立即自动报警,提醒护理人员及时处

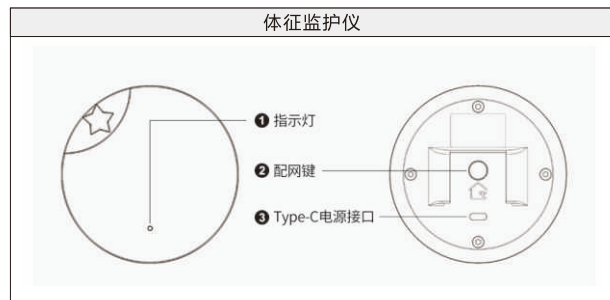

### 1、产品安装图

- (1) 设备支持两种安装固定方式: 螺丝/3M胶, 且设备角度可根据实际场景进行调整。
- (2) 设备安装高度建议为距床面1-1.5米之间。

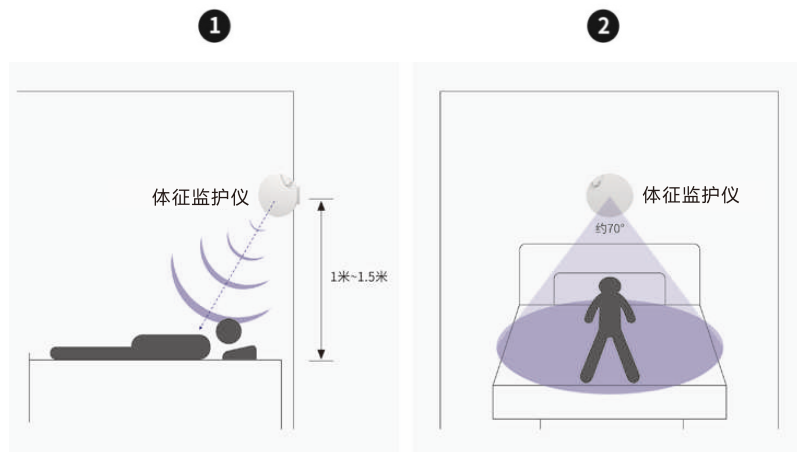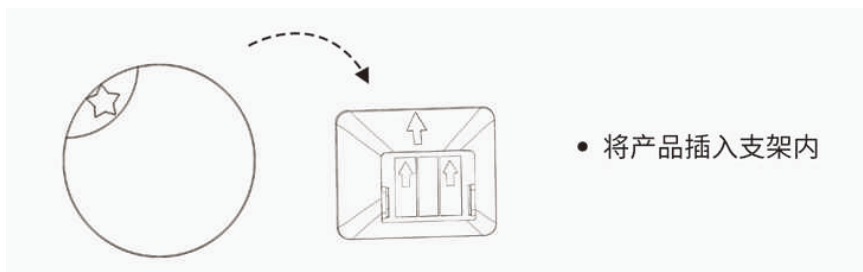

## 二、使用说明

### 1、注意事项

- (1) 一张床只能安装一个体征监护, 且只能监测一人。
- (2) 此产品不适用于体内有金属支架或戴心脏起搏器的人群!
- (3) 使用此产品时, 应保证按照安装要求进行安装, 否则会导致监测不准确。
- (4) 此产品仅支持2.4G的WiFi网络, 不支持5G 频段。

### 2、设备绑定

- (1) 体征监护仪正常工作后, 打开“机构养老”/“社区养老”App, 进入“长者房间设备绑定”界面, 选择需要绑定房间进入绑定设备(若无房间, 请先在对应的管理平台上添加好房间);
- (2) 下拉到床位设备, 点击“请选择设备绑定”, 在体征监护仪里点击“去绑定”, 将手机尽量靠近体征监护仪, 按照App上的提示进行按步骤即可完成绑定。

## 三、技术参数

|       |             |       |            |
|-------|-------------|-------|------------|
| 通讯方式: | WiFi (2.4G) | 供电方式: | 适配器供电      |
| 供电接口: | Type-C      | 工作电压: | 5V         |
| 工作温度: | -20℃~+50℃   | 工作湿度: | ≤80% (无凝结) |
| 尺寸:   | Φ98.5x20mm  | 重量:   | 100g       |

## 四、免责声明

本产品属电子产品, 为用户提供睡眠监测等辅助作用, 不作为专业医疗设备使用, 不承担如设备断电断网、环境干扰、超出监测范围等情况造成的漏警、虚警引起的健康风险和法律责任, 相关健康问题, 请咨询专业医生。