

1

—· 设备整机介绍 ·—



- 1、喇叭 2、显示屏 3、按键 4、麦克风
5、SIM 6、心率 7、充电磁吸

基本参数

名称：监护手表 | 显示屏：1.0寸TFT 128*96
型号：NB-WR1 | 电池容量：实电580mAh
系统：Mocor(RTOS) | 整机尺寸：55x31x14.8mm

2

—· 按键功能 ·—



- 1、开机：关机状态下长按按键开机。
- 2、关机：关机界面，长按按键确认关机。
- 3、SOS：开机状态，长按按键紧急呼救，报警到平台或子女App。
- 4、心率：开机状态，按按键直接进入心率检测界面，静待测量结果。
- 5、血氧：开机状态，按按键直接进入血氧检测界面，静待测量结果。
- 6、体温：开机状态，按按键直接进入体温检测界面，静待测量结果。

3

—· 充电警示 ·—



磁吸充电方式，吸磁匹配好正负极，就会直接吸连在一起。


温馨提示：请勿使用快充电源适配器，电池容易受损，消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的5V DC/1A电源适配器。消费者自行配备的电源适配器如不能符合要求时可能存在起火、漏电、爆炸的安全风险。

4

—· 界面说明 ·—



时钟

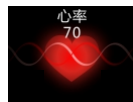

心率/血压



计步



体温



二维码



血氧



关机

关机界面可查看设备IMEI

5


—· 时钟/计步/心率测量 ·—



时钟界面
按键亮屏后显示当前时间。



计步活动
佩戴手表后，走路会计步，
会在此界面展示步数和公里数。

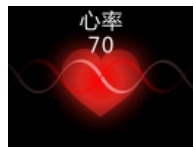

心率测量
按下按键直接进入心率检测界面，静待测量结果。

6

—· 血氧/体温测量 ·—



血氧测量
按下按键直接进入血氧测量界面，静待测量结果。



体温测量
按下按键直接进入体温测量界面，静待测量结果。

7

—· 保修卡 ·—

用户姓名: _____

详细地址: _____

电话号码: _____

产品名称: _____

产品型号: _____

购买日期: _____



亲爱的用户：

您好！感谢您选购来邦科技股份有限公司的产品。如您购买的本公司产品有任何质量问题需更换、保修，请将本卡填写完整后和产品一起邮寄到本公司。

来邦科技股份有限公司

地址：深圳市 深南大道7008号 阳光高尔夫大厦24楼 邮编：518040

全国统一服务热线：400-666-2428（医养事业部）

400-888-1170（安防事业部）

网址：www.LonBon.com

监护手表 快速使用指引

