


IP床位分机


—— 产品安装使用说明 ——



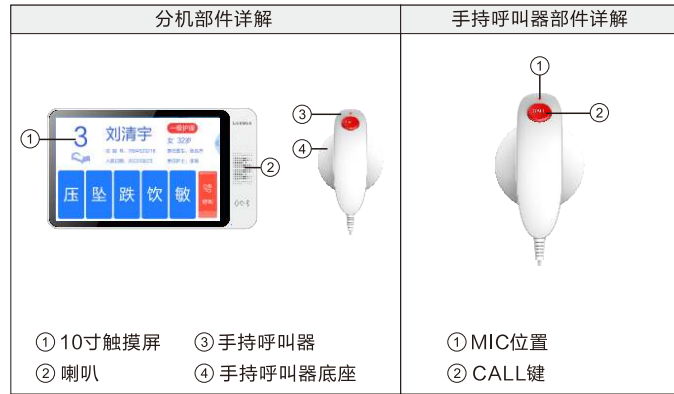

一、安装调试：

1、产品安装图：

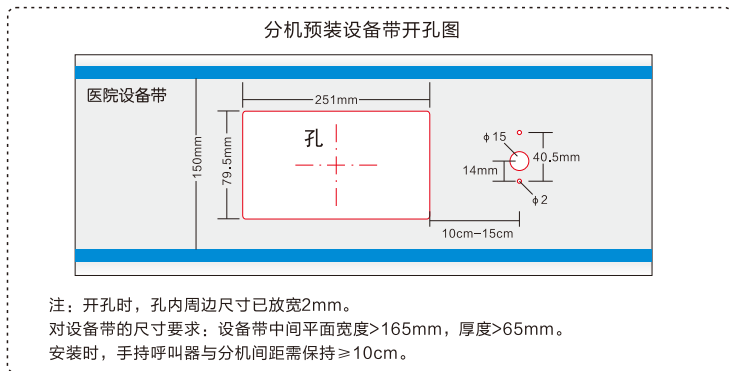

2、背面接口说明：


(1) **网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。

(2) **电源接口**：将右侧图示的最上面“电源+、电源-”分别于另购电源箱的其中1对GND +24V接线柱对应连接，给分机供电（供电范围为12~24V）。

(3) **外部设备接口**：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)

① 外接门灯(HBW-ME)：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

② 外接门灯(NBW-ME5)：将接门灯的“电源+、控制、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

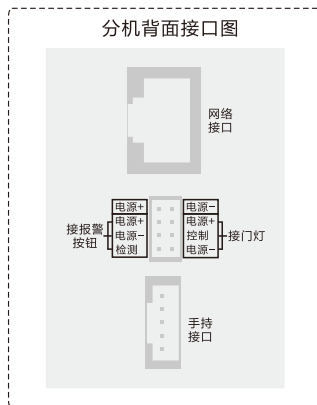

- ③ 外接报警按钮(ANW3)：将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。
- ④ 外接报警按钮(ANW4)：将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、蓝3芯线上。

二、设置调试：

1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统设置。

2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

3、输入序列号后四位进入基本设置，输入本机编号(包括:所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址。例如：

“本机编号”：1号主机 + 1号分机

“地址盒IP”：192.168.1.169(输入 与主机同-地址盒)

“IP地址”：192.168.1.11

“子网掩码”：255.255.255.0

“默认网关”：192.168.1.1

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

4、系统信息:可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

三、使用说明：

分机手持上有1个物理按键：CALL。

分机主界面上有1个功能键：呼叫。

可根据需要设置显示更多功能按键，如换药提醒、紧急增援、健康小巴士、消息通知、以及更多应用等；部分功能键还需要对接相关服务器才可以使用。

1、**呼叫护士**：按下手持上的“呼叫”按键，或主界面上的“呼叫”按键，可向护士站主机发起呼叫，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

2、**换药提醒**：按下主界面上的“换药提醒”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，主机上相应的路选分机按钮呈黄色闪亮，并语音提示“XX床换药提醒”。

3、**紧急增援**：按下主界面上的“紧急增援”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可向主机发起紧急增援，主机还可以接听，接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

4、**健康小巴士**：通过对接点播直播服务器后，按下主界面上的“健康小巴士”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可通过分机屏观看与健康相关的知识类视频类节目和图文类文章。

5、**消息通知**：按下主界面上的“消息通知”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可查看已发送的护理记录、用药说明、费用情况等提示性内容。

6、**更多应用**：按下主界面上的“更多应用”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可进入到更多按键的界面，来进一步使用更多的功能按键；这些更多的功能按键(如医院简介、费用查询、营养点餐、服务评价等)可通过服务器设置去完成。