

家属分机

产品安装使用说明



一、安装调试

1、产品安装图


壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

①先在墙面打螺丝，螺丝孔距：
100X100mm或75X75mm，
将配送的壁挂铁板固定在墙面上。

②再将机器挂于壁挂板的四个挂孔上，将机器向下推动
卡住。

③为防止机器松动，将防脱扣
置于机器上方，硅胶套紧紧顶
住机器上方铝框之后拧紧螺钉。

2、背面接口说明

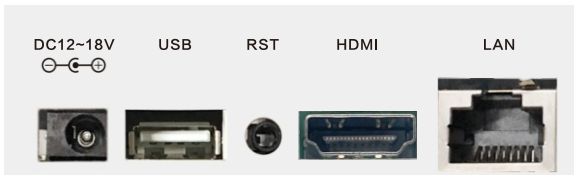

- (1) **网络接口 (LAN)**：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上。
- (2) **电源接口 (DC12~18V)**：将电源的输出插头接到此处，给设备供电。
- (3) **USB接口**：可插入鼠标，点击呼叫按钮进行呼叫。
- (4) **HDIM接口**：高清接口，可通过HDMI线与电视相连。
- (5) **外部设备接口的应用**：
 - ① 外接门灯 (NBW-ME)：将家属分机的电源输出（黄）、门灯数据（棕）、地线（黑）三芯引线对应与门灯上黄红黑三芯引线相连。
 - ② 外接门灯 (NBW-ME5)：将家属分机的电源输出（黄）、门灯数据（棕）、地线（黑）三芯引线对应与门灯上红白黑三芯引线相连。

注：家属分机现阶段软件不支持使用外接串口线，与产品确认待日后需求有变动会同步修改测试指引。

三、设置调试

安装完毕检查无误后，拨动电源键开机，待设备启动完毕后，长按主界面右上角的系统时间3秒以上进入到系统设置，选择“基本设置”项进入(进入需输入密码，密码为序列号后4位，可在系统信息中查看)，依次输入设备的本机编号、描述信息、本机IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址盒IP。

本机编号：如1+1，表示为1号主机的1号家属分机。

描述信息：如1号探视位，在管理后台上体现，便于使用人员统一记录管理。

本机IP地址：如192.168.1.100，根据网络管理分配的地址填写。

子网掩码：如255.255.255.0，根据网络管理分配的地址填写。

默认网关：如192.168.1.1，根据网络管理分配的地址填写。

服务器地址盒IP：如192.168.1.169，填写项目实施中的信息交互服务器IP地址。

所有项输入完毕后保存，设备重启后生效。

四、使用说明

注：所有的设置(包括预约、普通码、万能码、时长等)，全部以病区配置为准，若病区未绑定主机号，家属分机、手机APP的探视请求需返回提示信息。

1、请求探视

- (1) 家属可点击设备触摸屏上的请求探视按键，输入探视预约号或万能码进行探视。
- (2) 家属也可按下设备右下方的呼叫键，输入探视预约号或万能码进行探视。

2、对讲通话

家属分机请求探视后，主机接起此探视，主机端邀请患者床位分机加入，家属分机可与护士站主机、患者床位分机进行视频通话，家属分机可通过会议性话筒杆进行免提方式通话，也可以拿起手柄进行通话，视频画面可通过调节摄像头角度到最佳位置。

3、探视操作

主机在探视过程中，可根据自身情况，移除/添加床位分机，关闭/开启主机、家属分机、床位分机麦克风或摄像头，当家属分机与床位分机进行通话时主机可以选择退出此探视房间，使得家属分机与床位分机进行通话，主机也可以直接点击结束探视直接结束本次探视。

家属分机可以关闭/开启本机的麦克风与摄像头，点击退出，结束本次探视。

床位分机可以关闭/开启本机的麦克风与摄像头，点击退出，结束本次探视。