


# IP床位分机


— 产品安装使用说明 —



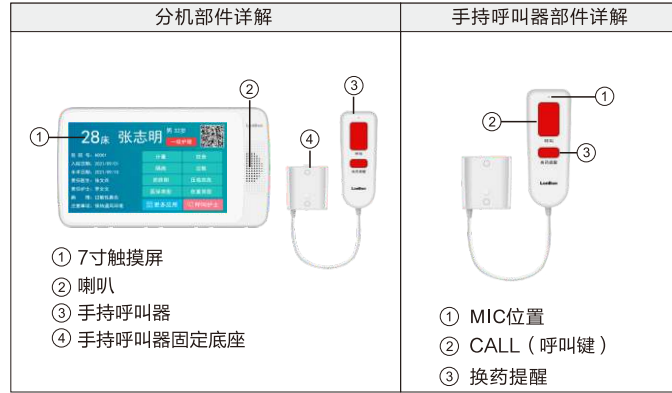


## 一、安装调试:

### 1、产品安装图:

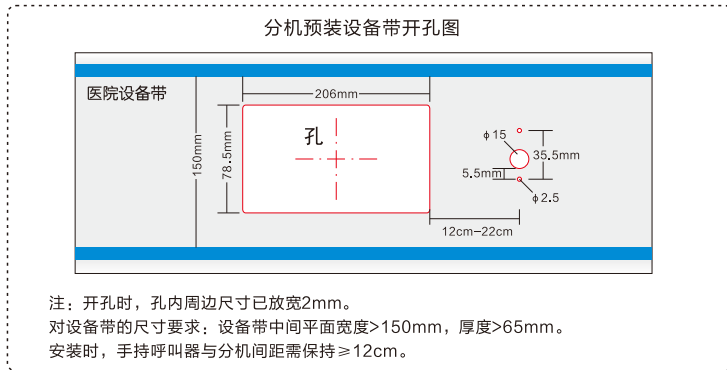

### 2、背面接口说明:

- (1) **网络接口:** 通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。
- (2) **电源接口:** (+、-): 将-、+分别于另购电源箱的其中1对GND+24V接线柱对应连接, 给分机供电(分机供电范围为12V~24V)。
- (3) **外部设备接口:** (外部接口设备必须先接入再通电, 拔掉时必须先断电)  
门灯控制接口(根据配置情况选择以下接线方式):  
① 当没有AN-K只有门灯时, 门灯的红色, 白色, 黑色三芯线接分机的门灯电源、门灯控制、地线接口。

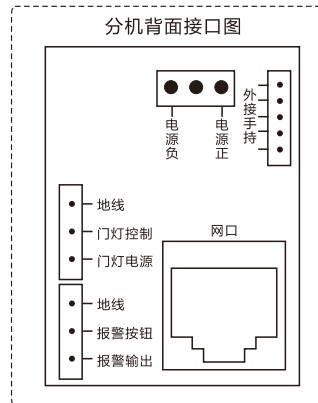

- ② 当有AN-K时, AN-K的电源、信号、地线对应接分机的门灯电源、门灯控制、地线接口; 门灯的红色、白色、黑色三芯线接AN-K的电源、门灯、地线接口。

## 二、设置调试:

- 1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。
- 2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入, 密码为序列号后四位, 可在“系统信息”中查看序列号信息。
- 3、输入序列号后四位进入无线网络, 打开“启用无线网络”开关, 点击选择需要连接的wifi, 输入wifi密码, 点击确定即可连接wifi网络(无线网络仅适用于NNV-A07-W型号)。
- 4、输入序列号后四位进入基本设置使用手动设置网络时, 输入本机编号(包括: 所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址。

例如:

“地址盒IP”: 192.168.1.169(输入与主机同一地址盒)

“IP地址”: 192.168.1.22

“子网掩码”: 255.255.255.0

“默认网关”: 192.168.1.1

最后按“保存”键, 分机将重新启动。设置完成, 分机可正常呼叫对讲。

- 5、重启: 将设备重新启动。
- 6、恢复出厂默认值: 将恢复成本机出厂时的默认设置。
- 7、系统信息: 可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

## 三、使用说明:

分机手持上有2个物理按键: 呼叫、换药提醒。

分机主界面上有5个功能键: 呼叫护士、紧急增援、健康小巴士、消息通知、更多应用。其中, 功能键可根据设置自由选择定义, 部分功能键还需要对接相关服务器才可以使用。

- 1、**呼叫护士:** 按下手持上的“呼叫”按键, 或主界面上的“呼叫护士”按键, 可向护士站主机发起呼叫, 主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。
- 2、**换药提醒:** 按下手持上的“换药提醒”按键, 主机上相应的路选分机按钮呈黄色闪亮, 并语音提示“XX床换药提醒”。
- 3、**紧急增援:** 按下主界面上的“紧急增援”按键, 可向主机发起紧急增援, 主机还可以接听, 接通后可通过手持跟主机进行双向通话。
- 4、**健康小巴士:** 通过对接点播直播服务器后, 按下主界面上的“健康小巴士”按键, 可通过分机屏幕观看与健康相关的知识类视频类节目和图文类文章。
- 5、**消息通知:** 按下主界面上的“消息通知”按键, 可查看已发送的护理记录、用药说明、费用情况等提示性内容。
- 6、**更多应用:** 按下主界面上的“更多应用”按键, 可进入到更多按键的界面, 来进一步使用更多的功能按键; 这些功能按键(如医院简介、费用查询、营养点餐、服务评价等)可通过服务器设置去完成。